



Så använder du hjärtstartaren Philips HeartStart HS1

Vid misstänkt hjärtstopp: Be någon att larma 112 och hämta hjärtstartaren. Starta HLR omgående.

- 1** Starta hjärtstartaren genom att dra i handtaget eller trycka på den gröna på/av-knappen. Följ hjärtstartarens röstinstruktioner, de kommer att vägleda dig steg för steg.

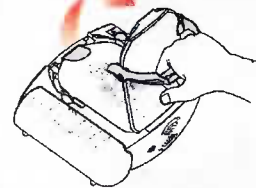



- 2** Ta bort alla kläder från bröstkorgen. Klipp om nödvändigt, sax finns i väskan. Torka fuktig hud och raka vid behov.

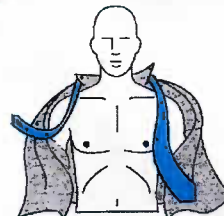

- 3** Dra bort skyddslocket/förseglingen och ta upp de vita självhäftande elektroderna ur kassetten.




- 4** Dra bort en elektrod i taget från det gula mellanlägget och placera elektroden exakt som bilden visar på elektroden. Stryk fast elektroderna ordentligt mot bröstkorgen.

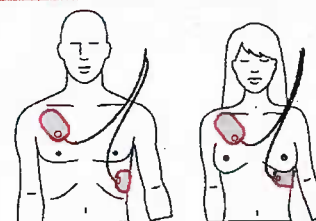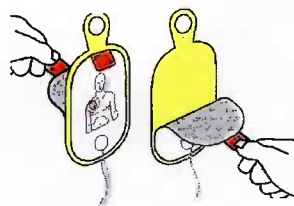


- 5** Rör inte personen. Hjärtstartaren analyserar nu hjärtrytmen. Om hjärtstartaren hittar en behandlingsbar rytm kommer den att uppmana dig att trycka på defibrilleringsknappen.



- 6** Tryck på den orangea blinkande knappen om defibrillering rekommenderas. Se till att ingen är i fysisk kontakt med personen.

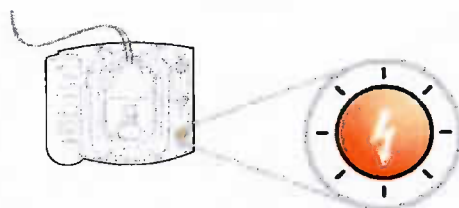

- 7** Starta hjärt-lungräddning. Vill du ha hjälp, tryck på den blinkande blå knappen. HLR ska pågå med så få avbrott som möjligt. Fortsätt att följa hjärtstartarens instruktioner. Om personen visar tydliga livstecken placera om möjligt personen i stabilt sidoläge.

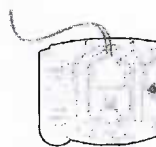

Er kontakt för service och utbildning:

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 12, 171 54 Solna

Tfn: 010-172 22 00
E-post: info@hlr-konsulten.se

www.hlr-konsulten.se
www.hlr-butiken.se